

Ficha Técnica de Producto

CUPERSAN[®]gel

HIDROGEL CON COBRE Y ALOE VERA PARA
EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPLEJAS

60 GRAMOS NETO
USO EXTERNO



Uso previsto:

Tratamiento externo de heridas, heridas crónicas, heridas crónicas infectadas, úlceras de pie diabético, úlceras por presión, úlceras vasculares, úlceras venosas, úlceras varicosas, úlceras arteriales, úlceras mixtas y todo tipo de herida cutánea que requiera tratamiento.

Aplicar una vez retirado todo el tejido esfacelado.

Producto de uso médico.

Uso externo, mantener alejado de niños y a temperatura ambiente no superior a 30°C.

www.cuperscience.cl / contacto@cuperscience.cl

CuperScience[®]
ciencia + vida

Hidrogel de Cobre y Aloe Vera para el tratamiento de heridas complejas.

Composición del producto:

Cada 100 gramos de este producto contiene:

Cobre: 1.2% (Como sulfato de cobre pentahidratado)

Aloe Vera: 0,1%

Excipientes: Benzoato de sodio, caprilil sulfonato de sodio, glicerina, polisacáridos de alto peso molecular, alcohol polivinílico, agua purificada.

Tratamiento:

Este producto puede usarse por períodos prolongados de tiempo. El profesional tratante indicará la frecuencia de uso apropiada.

Principios de funcionamiento:

La liberación prolongada de iones cúpricos mientras la herida se encuentra cubierta y húmeda, otorga condiciones ideales al lecho de la herida para prevenir el desarrollo microbiológico y evitar la maceración del tejido de granulación y tejido circundante.

Precauciones:

Aplicar **Cupersan Gel** una vez retirado todo el tejido esfacelado o necrótico.

En pacientes con alta sensibilidad, la aplicación de **Cupersan Gel** puede generar sensación de dolor que luego disminuirá hasta su total desaparición.

Niños: Producto de uso externo. No existen contraindicaciones.

Adultos mayores: Producto de uso externo. No existen contraindicaciones

Embarazo y lactancia: Producto de uso externo. No existen contraindicaciones.

Mantener a temperatura ambiente no superior a 30°.

Úlceras arteriales y varicosas: Considerar una estrategia para el manejo del dolor.

**NO USE ESTE PRODUCTO DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE.
DESCARTAR ENVASE UNA VEZ VACÍO.**

Forma de Uso

Limpiar la herida y retirar por completo el tejido esfacelado o necrótico previo a la aplicación de **Cupersan Gel**. Se recomienda el uso de **Cupersan Clean** para limpiar, descontaminar y desprender tejido esfacelado.

1. Retirar la tapa del envase.
2. Aplicar una capa de 5 mm de **Cupersan Gel** sobre la herida, o rellenar la úlcera hasta rebalse.
3. Aplicar una capa fina de **Cupersan Gel** en el borde de la herida o úlcera y 2 cm a la redonda de ella.
4. Cubrir la herida o úlcera con gasa parafinada procurando que sus bordes sobrepasen el tamaño de la herida o úlcera por un 1 cm.
5. Tapar la herida o úlcera con un apósito tradicional.
6. Sujetar con una venda.
7. Repetir el procedimiento según indicación del profesional tratante.

Fabricación:

Fabricado por Knop Laboratorios S.A. Av. Industrial 1198 Belloto, Quilpué, para Cuperscience SPA, Inscripción I.S.P. N°424/18, Pilmaiquén 3699, Renca, Santiago de Chile.

Dispositivo médico I.S.P. N° DDM/2160/19.

Más información en www.cuperscience.cl